



Asiakasohje 13.3.2020

KORONAVIRUSPOTILAAN HOIDOSSA KÄYTETYN KAASUPULLON KÄSITTELY

Jos kaasupulloa on käytetty koronaviruspotilaan hoidossa, pyydämme toimimaan seuraavasti:

1. Irrota ja hävitä kaikki potilaan hoidossa käytetyt välineet, kuten maski/viikset.
2. Pyyhi kaasupullo huolellisesti 70-prosenttisella isopropyylialkoholiliuoksella.
3. Pakkaa kaasupullo kahteen erilliseen muovikääreeseen. Jos pulloja on useita, kääri jokainen niistä erikseen.
4. Merkitse muoveihin kääritty kaasupullo "tartuntavaara"-merkillä tai kirjoittamalla muoviin "tartuntavaara".
5. Toimita kaasupullo yksikön normaalin prosessin mukaan tyhjien kaasupullojen varastoon.

Toimimalla edellä mainitulla tavalla suojaamme sekä kaasupullojen kuljettajia että pulloja täyttäviä operaattoreita virustartunnalta.

Kiitos avustasi!

Oy Linde Gas Ab